

## Wechsel von Adaptern für Germlyser® / Baclyser® Filter



### Empfehlung zum Umgang und Wechsel von Adaptern für Germlyser® / Baclyser® Sterilfilter

Adapter dienen dem schnellen Wechsel und dem reibungslosen Betrieb von Sterilfiltern. Alle Adapter sind mit einem Ventil ausgestattet, das eine Wasserentnahme ohne Sterilfilter verhindert.

Folgende Empfehlungen dienen dem einwandfreien Betrieb der Germlyser® / Baclyser® Sterilfilter und damit der Sicherheit von Patienten:


#### 1. Installation und Wechsel der Adapter:

Adapter müssen im Zuge der Neuinstallation geprüft werden. Dazu ist der Wasserhahn zu öffnen, ohne dass ein Sterilfilter adaptiert ist. Der Adapter muss in diesem Fall wasserdicht sein, ansonsten darf eine Filterinstallation nicht erfolgen.



##### Schnellverschluss-Kupplung:

Installierte Schnellverschluss-Kupplung zum Wechseln mit Hilfe eines Schraubenschlüssels lösen

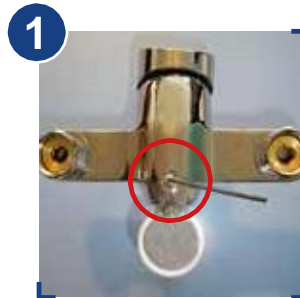

##### Adapter A-Filter:

Zum Lösen des Adapters die Schraube an der Armatur-Rückseite mit Hilfe eines Imbusschlüssels entfernen. Adapter abnehmen und einen neuen installieren



##### Schnellverschluss-Kupplung:

Dichtungsring einlegen und neue Schnellverschluss-Kupplung fest einschrauben

#### 2. Umgang und Pflege mit Adaptern:

Beim Wechsel der Sterilfilter fallen immer geringere Mengen an unfiltriertem Wasser an. Diese führen über die Zeit zu Ablagerungen auf und in den Adaptern. Je nach Wasserqualität zeigen sich in Einzelfällen sichtbare Ablagerungen schon nach 3 Monaten. An anderen Stellen sind Ablagerungen auch nach 6 Monaten nicht sichtbar. **Wir empfehlen den Wechsel der Adapter nach einer Einsatzdauer von 6 bis 12 Monaten.** Bitte beachten Sie zur Sicherheit Ihrer Patienten, dass Ablagerungen in den Adaptern beim Wechseln die Filterdichtungen beschädigen können, was zu Undichtigkeiten führen kann.

**Gerne stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter für weitere Informationen zur Verfügung.**